

medi footsupport kullanım kılavuzu

medi footsupport içlikler, çok özel ihtiyaçları olan ayaklar için geliştirilmiş yardımcı araçlardır.

Kullanım amacı

İçlikler, hastanın ayağına, endikasyona uygun bakımı sağlamak için kullanılan tıbbi ürünlerdir.

Endikasyonlar

İçlikler, fonksiyonel terapi için aşağıdaki tanılarda kullanılabilir:

- **Bacakların artrozu**
Comfort (pro)
- **Diyabet nöropatileri**
Comfort (pro)
- **Topuk diki / Plantar fasiit**
Heel Pain (pro)
- **Hallux rigidus**
Control (slim)
- **Hallux valgus**
Business (pro), Business slim (pro), Gentlemen pro, Ballerinas pro, High Heels (pro)
- **Metatarsalji**
Control (slim)
- **İçi boş ayak**
Comfort (pro)
- **Bükük ayak**
Junior, Active, Business (pro), Business slim (pro), Gentlemen pro, Ballerinas pro
- **Yarı düztaban**
Junior, Active, Business (pro), Business slim (pro), Gentlemen pro, Ballerinas pro, High Heels (pro)
- **Düztaban**
Junior, Active, Business (pro), Business slim (pro), Gentlemen pro, Ballerinas pro, High Heels (pro)
- **Taraklı ayak**
Business (pro), Business slim (pro), Gentlemen pro, Ballerinas pro

Kontrendikasyonlar

Yok

Ürünün performans özellikleri

- **Gömer**
İçliğin gömmeli özellikleri, ayağı basınç zirvelerinden korur ve ayağın belli kısımlarındaki yükü planlı bir şekilde alır.
- **Destekler**
İçliğin desteklemeli fonksiyonu, ayağın belli kısımlarındaki yükü alabilir, yuvarlanma davranışını iyileştirebilir ve ayağın fonksiyonel stabilitesinin iyileştirilmesine yardımcı olur.

• **Ağrıyı azaltır**

İçliğin yapısı ve fonksiyonel materyallerin kombinasyonu, ağrının azaltılmasına yardımcı olabilir.

• **Düzeltilir**

İçliklerin düzeltme fonksiyonu, ayağın belli yerlerindeki destekleyici farklı elemanlarla, örneğin uzunlamasına yaydaki düzelten bir destekle sağlanır.

Önemli uyarılar

Kullanım uyarısı:

- İçlikler her zaman çift olarak ve ancak sağlam ciltlerde kullanılmalı, açık yaraların üzerinde kullanılmamalıdır. Ayrıca içlikler, tek bir hastanın birkaç kez kullanması için tasarlanmıştır. Ürünler, uzman veya eğitilmiş personel tarafından verilmelidir. Ayrıca ürün, üreticinin kullanım kılavuzuna (endikasyona, takma talimatına, saklama ve bakım uyarısına) ve uzman personelin söz konusu talimatlarına göre kullanılmalıdır.
- Kullanmadan ve merhemlerden, ciltteki nemden ve çevre etkilerinden kaynaklanan yıpranma, içliklerin kullanım ömrünü kısaltabilir ve tıbbi etkisini azaltabilir. Bu nedenle, doktorunuzda ve/veya bayinizde düzenli olarak kontrol ettirmeniz önerilir.

Öngörülen kullanıcı:

- Öngörülen kullanıcıların arasında, sağlık sektöründeki çalışanlar ve hastalar ile, sağlık sektöründeki çalışanların gerekli açıklamasından sonra, bakımı destekleyen kişiler de bulunmaktadır.

Hasta hedef grubu:

- Sağlık mesleklerinde çalışanlar, üreticinin bilgilerini dikkate alarak yetişkin ve çocuklara, kullanıma sunulan ölçüler/boylar ve gerekli fonksiyonlar/endikasyonlar yardımıyla ve kendi sorumlulukları altında bakar.

Bertaraf:

- Ürünü evsel atıklarla birlikte bertaraf edebilirsiniz.

Yan etkiler:

- Ayakkabıda basınç yerleri veya kayma oluşabilir.
Bu nedenle uygun ayakkabı kullanın, yoksa kullanım riski oluşabilir.

Takma talimatları

- İçlikler bir uzman tarafından ayak ve ayakkabıya göre özel olarak ayarlanabilir.
- Gerekirse, ideal bir uyma şekli sağlamak için mevcut taban içliklerini çıkartın.
- Duruma göre, ayaklarınızın içliklere alışması gerekebilir. Bu, birkaç gün, en fazla ise 2 hafta sürebilir.
- Kullanım sırasında ağrı ve/veya rahatsızlık hissi oluşursa, lütfen içlikleri hemen çıkarıp doktorunuz veya ürünü satın aldığınız mağaza ile iletişime geçin.
- İçliklerinizi kullanırken sürekli sorun yaşıyorsanız, doktorunuza başvurun.

Bakım uyarıları

- Gerekirse, içlikleri ıslak bir bezle temizleyin.
 - Temizlik için aseton içeren deterjan kullanmayın.
 - İçlikleri kalorifer üzerinde kurutmayın veya diğer doğrudan ısı kaynaklarına maruz bırakmayın.
-

Teminat, garanti ve sorumluluk bilgisi

- Ürün, bir hastada birkaç kez kullanılmak üzere tasarlanmıştır ve böylece üçüncü kişilere verilmesi uygun değildir. Birden fazla kişinin tedavisi için veya amacına uygun olmayacak şekilde kullanıldığında, ürün garantisi geçersiz olur.
- Amacına uygun olmayan kullanımdan kaynaklanan hasarlar için hiçbir teminat sağlanmaz. İçliklerin solması, iade nedeni olmaz.
- İçliğin üzerindeki ürün işareti, önemli bir bileşendir. Bir medi ürünündeki bu işareti çıkarttığınızda, garanti, tamir veya değişim hakkınız kaybolur.
- Ürünle ilgili, örneğin içlikteki hasarlar veya uyma şeklindeki kusurlar gibi şikayetler durumunda lütfen doğrudan tıbbi ürünler satıcınıza başvurun. Üreticiye ve üye ülkenin yetkili makamına ancak sağlık durumunun büyük ölçüde kötüleşmesine veya ölüme neden olabilecek ağır olaylar bildirilmelidir. Ağır olaylar, 2017/745 (MDR) sayılı (AB) yönetmeliği madde 2 no 65 altında tanımlanmıştır.

Taşıma ve saklama koşulları

- Ürünlerin kuru bir yerde saklanması ve doğrudan güneş ışınlarından korunması gerekir.
- İçliklerin kullanım ömrü 42 aydır. Buna depolama süresi ve kullanım süresi de dahildir. Burada kullanım süresi, kullanım yoğunluğuna bağlı olarak 6-12 ay arası olabilir.

Talimatın son revizyonunun tarihi, talimatın son sayfasında belirtilmiştir. Üretici, uygunluk işareti ve varsa vekiller hakkındaki bilgiler, pakette belirtilmiştir.